

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per l'uso: contengono informazioni importanti su come usare il prodotto. Per eventuali domande si rivolga al suo farmacista, al suo medico, oppure direttamente a noi.

BAUSCH + LOMB

Artelac® Reactive

0.24% acido ialuronico (come ialuronato di sodio), 2% Ectoin®, sodio cloruro, idrossido di sodio (per la regolazione del pH) e acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni d'uso: soluzione oftalmica per il trattamento e la prevenzione dei sintomi della congiuntivite allergica, per donare sollievo agli occhi irritati ed idratazione oculare.

Cos'è ARTELAC® REACTIVE?

Artelac® Reactive è un dispositivo medico contenente Ectoin®, una molecola naturale che agisce proteggendo le cellule, con proprietà antinfiammatorie e di stabilizzazione della membrana cellulare, e acido ialuronico, una molecola naturale che dona sollievo all'occhio grazie alle sue elevate capacità di legare e stabilizzare l'acqua.

La formulazione tecnologicamente avanzata possiede alta tollerabilità dato che è priva di conservanti e sostanze tamponanti.

A cosa serve ARTELAC® REACTIVE?

Artelac® Reactive è una soluzione isotonica oculare che può essere utilizzata per trattare e prevenire i sintomi della congiuntivite allergica stagionale o perenne, causata, per esempio, da pollini, acari della polvere, peli di animali o muffe. Contribuisce a ridurre efficacemente rossore, irritazione, lacrimazione e prurito agli occhi; l'idratazione oculare dona sollievo.

Sulla base dei dati disponibili, il prodotto può essere utilizzato in bambini, donne in gravidanza e in allattamento.

Quando usare ARTELAC® REACTIVE?

Artelac® Reactive stabilizza il film lacrimale naturale in due modi: l'acido ialuronico agisce positivamente sullo strato acquoso, mentre l'Ectoin® rafforza lo strato lipidico. Questa doppia azione protegge l'occhio contro l'azione dannosa degli allergeni e altri fattori esterni, e sostiene il processo di rigenerazione della congiuntiva irritata e sensibile.

Artelac® Reactive non contiene conservanti e può essere utilizzato anche da chi indossa lenti a contatto oppure in caso di occhi sensibili.


Con che frequenza e per quanto tempo usare ARTELAC® REACTIVE?

Instillare 1-2 gocce di Artelac® Reactive per ciascun occhio, al bisogno. Il prodotto può essere usato tutti i giorni e tutte le volte che si desidera. Può essere usato anche per periodi di tempo prolungati.


Come usare ARTELAC® REACTIVE?

Il meccanismo di pompaggio brevettato di Artelac® Reactive permette di eliminare l'uso dei conservanti.


Le illustrazioni mostrano l'uso semplice e facile di Artelac® Reactive.

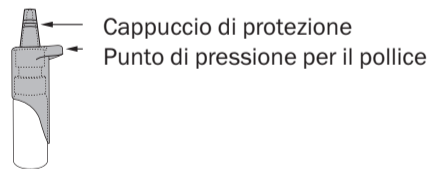


1. Rimuovere il cappuccio protettivo dall'estremità del flacone prima dell'uso. Assicurarsi che l'estremità del flacone non venga a contatto con le dita.

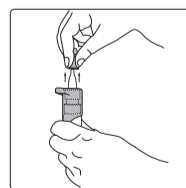


2. Posizionare il pollice sul punto di pressione ergonomico e due dita sulla parte inferiore del flaconcino.

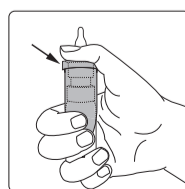

3. Capovolgere e tenere il flaconcino come mostrato. Prima di utilizzare il dispenser dosatore per la prima volta, è necessario attivarlo premendo sul punto di pressione all'incirca 7 volte fino a quando non viene erogata la prima goccia.

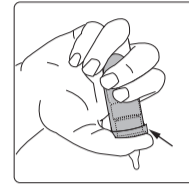

4. Per instillare la goccia, inclinare leggermente il capo all'indietro e tenere il flacone al di sopra degli occhi nella posizione più adatta. Tirare delicatamente verso il basso la palpebra inferiore con un dito della mano libera e, allo stesso tempo, tenendo il flaconcino in posizione verticale sull'occhio, premere delicatamente il punto di pressione per instillare una goccia nell'occhio. Chiudere l'occhio ed effettuare lenti movimenti rotatori per distribuire in maniera omogenea la goccia sulla superficie dell'occhio.

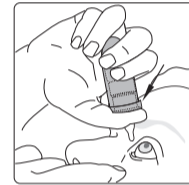

Può utilizzare l'altra mano per un ulteriore sostegno e maggiore precisione in caso se ne senta la necessità.

5. Evitare il contatto tra l'estremità del flacone e le dita o gli occhi per prevenire ogni possibile contaminazione della soluzione.

6. Rimettere il cappuccio protettivo sulla punta del flacone subito dopo l'uso.

Quando non usare ARTELAC® REACTIVE?

Non usare il prodotto in caso di ipersensibilità ad uno qualsiasi dei componenti.

Informazioni importanti sull'uso di ARTELAC® REACTIVE

- Prima del primo utilizzo, o dopo l'inutilizzo per un certo periodo di tempo è necessario attivare il sistema di pompaggio della soluzione. Per pompare la soluzione, tenere il flaconcino con la punta rivolta verso il basso.
- Molto raramente sono state segnalate reazioni di ipersensibilità locale. In questi casi, il trattamento deve essere sospeso.
- Dopo l'instillazione del prodotto si può avere una temporanea visione offuscata, con possibile impatto negativo sulla guida di veicoli o sull'uso di macchinari.
- Evitare il contatto della punta del flaconcino con la superficie dell'occhio per prevenire possibili lesioni all'occhio o contaminazione della soluzione.
- Eliminare ogni possibile goccia di soluzione residua dopo l'applicazione.
- L'utilizzo scorretto del prodotto contrariamente a quanto riportato nelle istruzioni per l'uso potrebbe causare lo scivolamento del prodotto dalla mano, causando lesioni all'occhio.
- Attendere circa 15 minuti prima di usare un altro prodotto oculare.
- Non usare dopo la data di scadenza.
- Non usare se la confezione o il flaconcino sono danneggiati.
- Artelac® Reactive è costituito da piccole parti in plastica che possono essere inavvertitamente inghiottite dai bambini. Esiste quindi un pericolo di soffocamento per cui bisogna tenere Artelac® Reactive fuori dalla portata dei bambini.
- Artelac® Reactive può essere utilizzato sia con lenti a contatto morbide che rigide.

Come conservare ARTELAC® REACTIVE?

Conservare ad una temperatura compresa tra 2 °C e 25 °C. Il flacone permette un uso del prodotto per 6 mesi dopo la prima apertura.

Confezioni:

Artelac® Reactive è disponibile in confezione da 10 ml di soluzione oftalmica.

Artelac® Reactive è disponibile in comode confezioni monodose senza conservanti.

Distributore

Bausch & Lomb – IOM S.p.A.

Viale Martesana, 12


20090 Vimodrone (MI)

Telefono: 848 390078

Data di revisione del foglio illustrativo:

Giugno 2018











Fabbricante

 Dr. Gerhard Mann chem.-pharm.
Fabrik GmbH

Brunsbütteler Damm 165-173

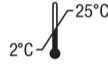13581 Berlino

**Simboli:**

	Marchatura CE e numero dell'Organismo notificato		Data di scadenza
	Numero di lotto		Consultare le istruzioni per l'uso
	Limiti di temperatura		Prodotto sterilizzato mediante tecnica in asepsi
	Eliminare il dispositivo medico dopo 6 mesi dall'apertura		Non utilizzare se il confezionamento o le confezioni multidose sono danneggiate
	Fabbricante		Attenzione (consultare le istruzioni per l'uso per importanti avvertenze/precauzioni)

Artelac è un marchio registrato di Bausch & Lomb Incorporated o di sue affiliate.

© Bausch & Lomb Incorporated.